

Test antigénique Rapide pour enfant - Covid-Viro® All IN - Aaz - Boîte de 10 tests

Spécialement conçu et sécurisé pour prélèvements nasopharyngés sur enfants.

Compte tenu de la réglementation en vigueur, la réalisation des prélèvements nasopharyngés en vue des tests antigéniques est confiée aux médecins, pharmaciens, infirmiers diplômés d'Etat mais aussi aux autres professionnels de santé (Consulter le document en PDF - Autres_Professionnels de santé_habilités selon [art.25 / Arrêté du 10.07.20](#)).

Test immunochromatographique utilisant des anticorps monoclonaux très sensibles pour détecter l'antigène de la nucléocapside du SARS-CoV-2 dans un échantillon nasal.

- Système sécurisé : support avec dosette de tampon intégrée (pas de risque d'ingestion ni de projection sur la peau ou les muqueuses).
- Indolore : éponge de prélèvement intégrée (pas de risque de perforation de la cloison nasale).
- Fiable : 99% de corrélation avec le test PCR nasopharyngé.
- Rapide : résultat en 15 minutes.

Comment réaliser le test ?

1. Retrait du support et du capuchon de protection.
2. Insertion de l'éponge de prélèvement pour prélèvements nasopharyngés.
3. Insertion du test avec l'éponge dans le support.
4. Interprétation des résultats sous 15 minutes.

Par qui ?

- Médecins
- Infirmiers diplômés d'Etat
- Pharmaciens
- Autres ([consultez la liste des autres professions de santé](#))

Boîte de 10 tests contenant 1 notice d'utilisation.

Matériel Médical CE.

